

Brandi: Laianzhi 9108A
Ce: CE0370-4085-PPE/C2
Malli / Model: YXP311

FIN

Tuotteen nimi:

Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengitys suojain

Määrä: 20kpl rasiassa

Sovellettu standardi: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP3 NR

Viittaus asetukseen: EU 2016/425

Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta

Säilytysaika: 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.

Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Merkinnät:

R = Uudelleenkäytettävä

NR = Ei uudelleenkäytettävä (vain yhden työvuoron ajan käytettävä)

D = Täyttää tukkeutumattomuutta koskevat vaatimukset

Varoitus:

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. ainkana.)
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA:

1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS:

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTAJA:

Zhongshan Saifure Labor Protective Articles Co.,Ltd
No 4, Xihuan 4th Road, Southern District, Zhongshan, Guangdong, 528400 Kiina.
Tel: 0760-88871329
www.sftppe.com

TESTAAJA:

NTEK, testattu ja CE- hyväksytty standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti.
Shenzhen NTEK testing
technology Co.,Ltd. Campus
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
www.appluslaboratories.com

Raportti nro: S20071600801E-R1
Hyväksytty testi 16.7.2020
Säilytä tämä ohje huolellisesti.

CE-SERTIFIKAATIN MYÖNTÄJÄ:



LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI:

Huippu Group Oy
www.hg-hygienic.fi
Puh. +358 50 441 4539 / +358 50 4904065

Hengityssuojaimen käyttö:

1. Muodosta nenälle sopiva muoto taivuttamalla nenänkiinnitintä. Pidä suojainta kämmenellä niin että kiinnitysnauhat roikkuvat alaspäin.
2. Aseta suojain nenän ja suun päälle. Vedä alempi hihna niskaan taakse ja ylempi hihna pään taakse.
3. Käytä molempia käsiä asettaaksesi nenänkiinnitin nenän ympärille.
4. Varmista, että suoja on tiiviisti paikallaan. Siirrä tarvittaessa hihnojen paikkaa.

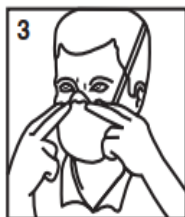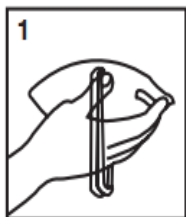

Huom! Varmista että hengityssuojain on tiivis hengittämällä voimakkaasti sisään ja ulos.
Varmista ettei ilmaa pääse vuotamaan suojaimen reunoilta. Säädä tarvittaessa suojainta.

MERKKIEN SELITYKSET



Ei uudelleenkäytettävä
Kan inte återanvändas

RUMMERINGAR KOMMENTAR



Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä
Observera, se bruksanvisningen före användning




Don't use when
packing damaged

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
Använd inte om paketet är skadat



See information supplied
by the manufacturer

Katso valmistajan toimittamat tiedot
Se information från tillverkaren

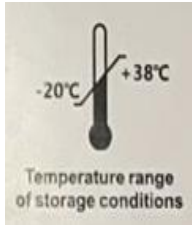

Temperature range
of storage conditions

Säilytyslämpötila
Förvaringstemperatur



Maximum relative humidity
of storage conditions

Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen kosteus
Maximal relativ luftfuktighet för lagringsförhållandena

SWEDISH

LAINANZHI 9108A FFP3 NR

Brandi: Laianzhi 9108A
CE: CE0370-4085-PPE/C2
Modell: YXP311

SWE

Produktnamn:

Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningskydd: Andningskydd för engångsbruk.
Kvantitet: 20st förpackning
Tillämpad Standard: EN 149 : 2001 + A1:2009, FFP3 NR
Förordningens referens: EU 2016/425
Förvaringstid: Two år från tillverkningsdatumet.
Användning: Produkten är avsedd at bäras för at skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Markeringar: R = Återanvändbar
NR = Kan inte återanvändas
D = Uppfyller icke-igensättningskrav

Varningar: 1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning av andningskydd eliminerar inte risken för att smittas av

en sjukdom eller infektion.

4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.

5. Använd produkten inom två år från tillverkningsdatumet.

6. Använd inte om förpackningen är skadad.

OBSERVERA:

1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.

2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminera området genast.

3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

FÖRVARING:

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.

2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.

3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 °C med en relativ luftfuktighet på <80 %.

TILVERKARE:

Zhongshan Saifure Labor Protective Articles Co.,Ltd

No 4, Xihuan 4th Road, Southern District, Zhongshan, Guangdong, 528400 Kiina.

Tel: 0760-88871329

www.sftppe.com

TESTLABORATORIUM:

NTEK, testad och CE-certifierad enligt standarden EN149:2001+A1:2009.

Shenzhen NTEK testing

technology Co.,Ltd. Campus

UAB – Ronda de la Font del

Carme, s/n

E - 08193 Bellaterra (Barcelona)

T +34 93 567 20 00

www.appluslaboratories.com

Certifikatnummer: S20071600801E-R1

Godkänt test: 16,7,2020

Förvara denna bruksanvisning.

UTGIVARE AV CE-CERTIFIKAT:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus

IMPORT OCH MARKNADSFÖRING:

Huippu Group Oy

www.hg-hygienic.fi

Puh. +358 50 441 / +358 50 4904065



Bruksanvisning:

1. Håll masken i kupad hand med näskupan uppåt och gummibanden hängande.

2. Placera skyddet över näsan och munnen. Dra den nedre remmen bakom nacken och den övre bakom huvudet.

3. Använd båda händer för att placera näskupan runt näsan för att skapa god tätning.

4. Säkerställ att skyddet är tätt på sin plats. Flytta på remmarna vid behov.

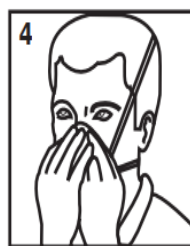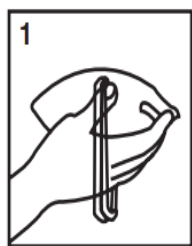

OBS! Säkerställ tätningen genom att kraftigt andas in och ut. Säkerställ att luften inte tränger sig igenom ur skyddets kanter. Justera skyddet vid behov.

