

FINNISH

KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN CE0370

DAFANG disposable surgical mask type IIR

Brandi: Dafang
EU CZBB/CE-01-11.1
Malli / Model: Kertakäyttöinen kirurginen hengityssuojain TYPEIIR

FIN

Tuotteen nimi:

Kuvaus: Hengityssuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu Kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengitys suojain

Määrä: 40kpl rasiassa

Sovellettu standardi: EN14683:2019

Viittaus asetukseen: 93/42/EEC

Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta

Säilytysaika: 2-vuotta valmistuspäivämäärästä.

Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön, ei steriili.

Varoitus:

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. ainkana.)
3. Hengityksen suojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä
4. Tuotteen käytön laiminlyönti voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kahden vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä
6. Älä käytä, jos pakkaus vaurioitunut.

HUOMAA:

1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat, vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saatuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityssuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vakavaa.

SÄILYTYS:

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta, ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20-38 C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa <80%.

VALMISTAJA:

Dafang Medical Treatment Co.,Ltd.
Middle Section of Dafang Road,Dafang Industrial Park,
Dingluan Town,Changyuan City,Henan Province
Tel: 86151527
www.dafangmedical.com

TESTAAJA:

Test report is issue by SGS according EN14683 standard
SGS -CSTC Standard Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd.Testing Center
3''Building No.889,Yishan Road,Xuhui District ,Shanghai,China
Email:sgs.china@sgs.com

www.sgsgroup.com.cn
Raportti nro: SL52025256675901TX
Hyväksytty testi June 17,2020
Säilytä tämä ohje huolellisesti.

KÄYTTÖOHJE

Suu-ja nenäsuojain, I. ”kirurginen maski”

Valmistaja

Tuotenumero

Käyttöohje:

1. Varmista, että suojain on ollut säilytettynä oikein kuivassa ja lialta suojassa
2. Pese kätesi huolellisesti saippualla ennen suojaimen päähän asettamista
3. Aseta suojain sekä suun, että nenän yli ja muotoile nenäkehys oman nenäsi mukaisesti. Varmista, että suojaimen ja kasvojen välissä ei ole näkyviä rakoja
4. Vältä koskemasta suojainta ulkona liikkuessasi.

Mikäli sinun pitää esimerkiksi korjata suojaimen asentoa tai raapia nenääsi maskin alla, pese kätesi tai käytä käsidesiä ensin

5. Poista suojain korva- tai päälennkien kautta, älä koske itse kasvosuojukseen.
6. Mikäli kyseessä on kertakäyttöinen henkilösuojain, heitä se välittömästi roskeen
7. Pese kätesi huolellisesti

Maahantuojaja: Huippu Group Oy
Laakeritie 7, 90630 OULU
Y-tunnus: 2085791-7
Puh. +358504414539 / +358504904065
www.hg-hygienic.fi


MERKKIEN SELITYKSET



Ei uudelleenkäytettävä
Kan inte återanvändas



Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
Använd inte om paketet är skadat

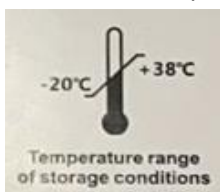

RUMMERINGAR KOMMENTAR



Huomio, katso käyttö-ohjeet ennen käyttöä
Observera, se bruksanvisningen före användning



Katso valmistajan toimittamat tiedot
Se information från tillverkaren



Säilytyslämpötila
Förvaringstemperatur

Varastointiolosuhteiden suurin suhteellinen
kosteus
Maximal relativ luftfuktighet för
lagringsförhållandena

SWEDISH

DAFANG engångskirurgisk mask typ IIR

Brandi: Dafang
EU CZBB/CE-01-11.1
Modell: Engångs kirurgisk mask typ IIR

SWE

Produktnamn:

Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningsskydd: Andningskydd för engångsbruk.
Kvantitet: 40st förpackning
Tillämpad Standard: EN14683:2019
Förordningens referens: 93/42/EEC
Förvaringstid: Two år från tillverkningsdatumet.
Användning: Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Varningar:

1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning av andningsskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhåll produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.
5. Använd produkten inom två år från tillverkningsdatumet.
6. Använd inte om förpackningen är skadad.

OBSERVERA:

1. Kontrollera andningsskyddet utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märket till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämnä det kontaminerade området genast.
3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

FÖRVARING:

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 °C med en relativ luftfuktighet på <80 %.

TILVERKARE:

Dafang Medical Treatment Co.,Ltd.
Middle Section of Dafang Road,Dafang Industrial Park,
Dingluan Town,Changyuan City,Henan Province
Tel: 86151527
www.dafangmedical.com

TESTLABORATORIUM:

Test report is issue by SGS according EN14683 standard
SGS -CSTC Standard Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd.Testing Center
3''Building No.889,Yishan Road,Xuhui District ,Shanghai,China
Email:sgs.china@sgs.com
www.sgsgroup.com.cn
Raportti nro: SL52025256675901TX
Hyväksytty testi June 17,2020
Förvara denna bruksanvisning.

BRUKSANVISNING

Mun- och nässkydd

Tillverkare

produktnummer

1. Se till att skyddet har lagrats ordentligt på en torr och smutsfri plats
2. Tvätta händerna noggrant med tvål innan du tar på locket
3. Placera skyddet över både munnen och näsan och forma näsramen enligt din egen näsa. Se till att det inte finns några synliga mellanrum mellan skölden och ansiktet
4. Undvik att vidröra skyddet när du rör dig utomhus.
Om du till exempel behöver korrigera skyddet eller skrapa näsan under masken, tvätta händerna eller använd handskar först
5. Ta bort locket genom öron- eller huvudöglorna, rör inte själv i ansiktsskyddet.
6. För personlig skyddsutrustning, kassera den omedelbart
7. Tvätta händerna ordentligt

Importör: Huippu Group Oy
Laakeritie 7, 90630 OULU
Y-tunnus: 2085791-7
Puh. +358504414539 / +358504904065
www.hg-hygienic.fi